

Peripheral

シースレスガイドとフローコントロールにより末梢血管内治療をサポート

BG | CATHETER

OPTIMO[®] PPI
SHEATHLESS KIT



より低侵襲なペリフェラル領域治療のために、OPTIMOをシースレス仕様にデザインしました。
太径の血管にも対応できるように、最大径15mmのオクリュージョンバルーンを搭載しました。
専用ダイレータを同梱し、準備の手間が少なくなりました。

■仕様


製品番号	カテーテル外径 (mm)	カテーテル内径 (inch)	有効長 (cm)	先端形状	JANコード
BGS87Q	2.77	0.087	25	ストレート	4562382435840
BGS87H	2.77	0.087	50	ストレート	4562382435857
BGS87HX <small>NEW SHAFT</small>	2.77	0.087	50	ストレート	4562382438070

■コンプライアンスチャート

液体注入量(mL)	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.5
拡張径(mm)	6.0	7.9	9.0	10.1	11.0	11.7	12.4	13.0	13.8	14.0	14.5	14.9	15.0

バルーン最大拡張径(この値を超える拡張はお控えください)

- 注1) このデータは、エア抜きを実施し、デッドスペースを液体で充填した状態でのものとなります。
- 注2) この数値はin vitroでの参考数値となります。
- 注3) 臨床上では造影下で十分にバルーンの状態を確認の上、ご使用ください。

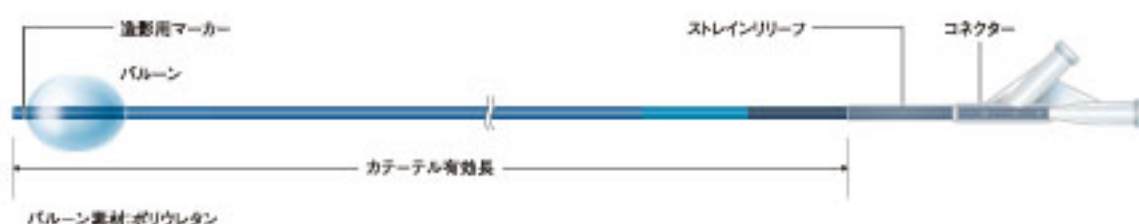

- 商品名: オプティモPPI
- 承認番号: 229006ZX00391000
- 一般名: 中心静脈系ガイディング用血管内カテーテル(中心静脈系閉塞用血管内カテーテル)
- クラス分類: 高度管理医療機器 クラスⅢ
- 再使用禁止
- 保険請求分類: 血管内手術用カテーテル/オクリュージョンカテーテル/特殊型

改良等の理由により、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。本製品を使用する際には、必ず最新文書をお読みください。

製造販売業者



本社 / 〒486-0808 愛知県春日井市田楽町字更屋敷1485番地

- お客様センター TEL 0568-54-7661 FAX 0568-87-0058
- 代販 TEL 0568-81-7954 FAX 0568-81-7785
- URL <http://www.tokaimedpro.co.jp/>
- E-mail info@tokaimedpro.co.jp

販売業者