

Be Brilliant™



シグニア補聴器

障害者総合支援法対応 補聴器カタログ

2021年9月版




signia


障害者総合支援法による 補聴器の交付手続きについて

1 身体障害者手帳の交付手続き

※基本的な補聴器支給制度の流れであり、各市区町村により異なる場合があります。詳しくはお住まいの市区町村「福祉課窓口」でご確認ください。

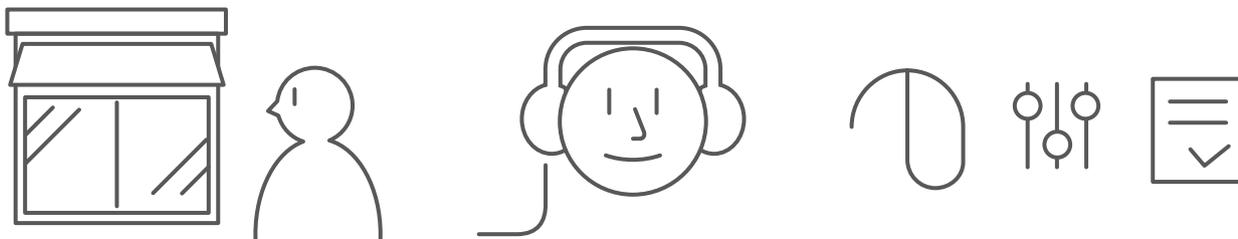

2 補聴器の交付手続き(身体障害者手帳をお持ちの方)

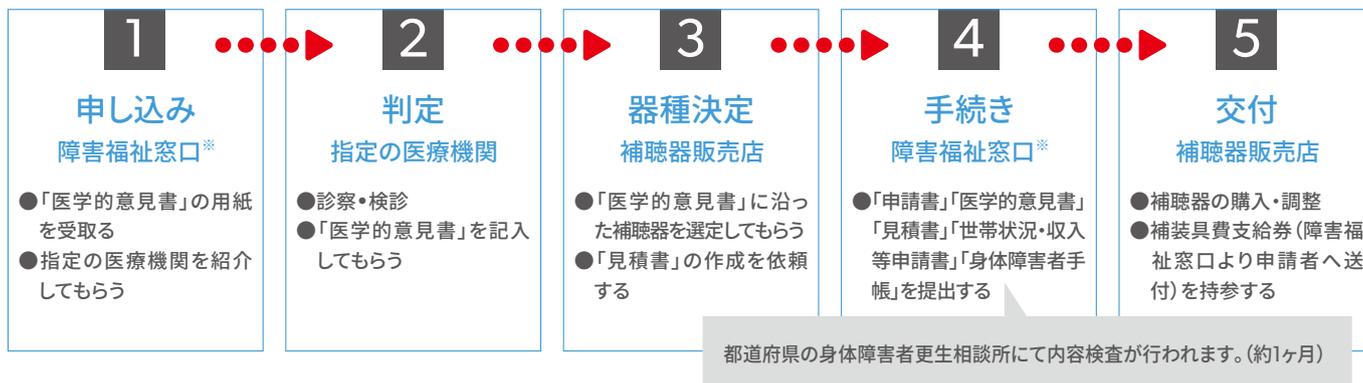

障害者総合支援法とは？

障害者総合支援法には、身体障害者障害程度等級のいずれかに該当した場合、各市区町村の福祉担当窓口へ申請手続きをすることで、原則一律1割の自己負担^{*}で補聴器など補装具の費用が支給される制度があります。

^{*}自己負担額は、原則1割負担となります。ただし、所得によっては例外もあります。

● 聴覚障害等級

級別	対象器種の目安	障害の状態
2級	重度難聴用	両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの(両耳全ろう)
3級		両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの)
4級	高度難聴用	1.両耳の聴力レベルが80デシベル以上のもの(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの) 2.両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50%以下のもの
6級		1.両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの(40センチメートル以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの) 2.一側耳の聴力レベルが90デシベル以上、他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの

^{*}目安として2級・3級に重度難聴用、4級・6級に高度難聴用の補聴器が支給されますが、例外もありますのでご注意ください。

補聴器の支給を受けるには

まずはお住まいの市区町村の役所内「福祉担当窓口」にご相談ください。

^{*}補聴器支給までの流れが、各市区町村により異なる場合があります。

● 障害者総合支援法 補聴器購入基準価格表

2018年4月1日改正

種目	対象器種の目安	名称	価格	耐用年数	備考
補聴器	重度	重度難聴用耳かけ型【Contrast SP+】	¥67,300 (非課税)	5年	※価格は電池を含むものであること。 ※身体の障害の状況により、イヤモールドを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額が加算されます。 ※重度難聴用耳かけ型でFM型受信機、オーディオシューを必要とする場合は、下記の交換価格の額の範囲内で必要な額が加算されます。 【修理基準】 ●イヤモールド交換：¥9,000 (非課税) ●オーディオシュー交換：¥5,000 (非課税)
	高度	高度難聴用耳かけ型【Contrast HP+】	¥43,900 (非課税)		

^{*}自己負担額は、原則1割負担となります。ただし、所得によっては例外もあります。

障害者総合支援法に対応した補聴器



高度難聴用
耳かけ型

Contrast HP+

コントラストHPプラス

32ch

リモコン対応

重度難聴用
耳かけ型

Contrast SP+

コントラストSPプラス

24ch

リモコン対応

特長

汗・水・湿気・ホコリをガード



様々なオプションに対応



(別売)



(別売)



(無料)

多彩なイヤモールド



● Contrast HP+ カラーバリエーション



ベージュ01



グレー03



ダークグラナイト66

Contrast HP+ 性能一覧

最大音響利得 (dB)		最大出力音圧レベル (dB)		誘導コイル感度 (dB)	保証	使用電池	電池寿命 (連続使用) (h)
HFA-FOG (±5dB以内)	ピーク以下 (+3dB以下)	HFA-OSPL90 (±4dB以内)	ピーク以下 (+3dB以下)	HFA-MASL (±6dB以内)			
66	70	128	131	96	1年	PR48	13 約260

販売名：補聴器 Contrast

(JIS C 5512:2015 2cc)

● Contrast SP+ カラーバリエーション



ベージュ01



グレー03



ダークグラナイト66

Contrast SP+ 性能一覧

最大音響利得 (dB)		最大出力音圧レベル (dB)		誘導コイル感度 (dB)	保証	使用電池	電池寿命 (連続使用) (h)
HFA-FOG (±5dB以内)	ピーク以下 (+3dB以下)	HFA-OSPL90 (±4dB以内)	ピーク以下 (+3dB以下)	HFA-MASL (±6dB以内)			
72	82	130	140	100	1年	PR44	675 約300

販売名：補聴器 Contrast

(JIS C 5512:2015 2cc)

1年保証

障害者総合支援法対応補聴器は、
お買い上げの日から1年間保証。

※保証期間内に補聴器本体に自然故障が生じた場合、無料で修理いたします。
※紛失および過失による故障は、保証＆サービスの対象外です(その他、詳しい保証規定は添付の保証書によります)。

「人の声の聞き取りやすさ」にこだわった Contrast

● 多チャンネル設計

シグニア補聴器は高精細の多チャンネル設計。
不要な雑音はカットし、聞きたい会話だけを拾います。
より静かでハッキリとした音質に近づきます。

● 聞こえのイメージ


16ch



24ch



32ch

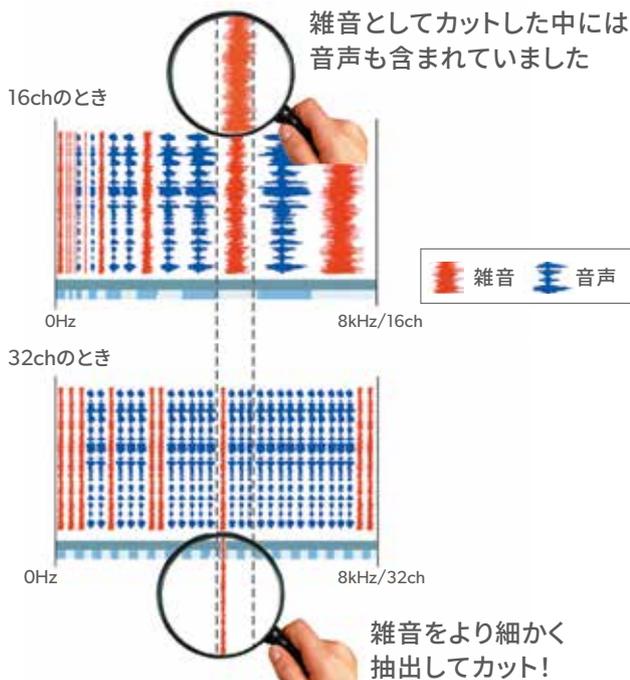

● ハウリングストッパー2


不快なピーピー音(ハウリング)を抑制する機能を搭載。ハウリングの存在を忘れるくらい強力になりました。食事をしたり、帽子を目深にかぶったときでも安心です。

OK!



● 周波数圧縮

聞き取りづらい高い音を圧縮して、言葉の識別しやすくします。
よりクリアな聞き取りが可能です。

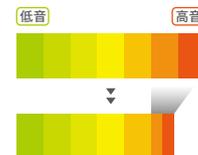

旧JIS規格での性能一覧 (JIS C 5512:2000 イヤシミュレータ)

Contrast HP+ 性能一覧

最大音響利得 (dB)		最大出力音圧レベル (dB)		誘導コイル感度 (dB) (±6dB以内)	保証	使用電池	電池寿命 (連続使用) (h)
2500Hz (±5dB以内)	ピーク以下	2500Hz (±5dB以内)	ピーク以下				
70	75	132	139	102	1年	PR48  13	約260

販売名: 補聴器 Contrast

(JIS C 5512:2000 イヤシミュレータ)

Contrast SP+ 性能一覧

最大音響利得 (dB)		最大出力音圧レベル (dB)		誘導コイル感度 (dB) (±6dB以内)	保証	使用電池	電池寿命 (連続使用) (h)
1600Hz (±5dB以内)	ピーク以下	1600Hz (±5dB以内)	ピーク以下				
74	82	136	150	105	1年	PR44  675	約300

販売名: 補聴器 Contrast

(JIS C 5512:2000 イヤシミュレータ)

アクセサリ関連

● リモコン



つなぐだけでTVの
サウンドを楽しめる!


スマートコネク

Smart Connect

カラー:ブラック

¥55,000(税込)(テレビバック2)

- ① ファンクションボタン
- ② ボリュームボタン
- ③ 3.5mmステレオ入力
- ④ FM入力端子

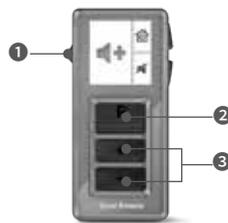

音量調節を
手元で簡単に!

スマートリモート

Smart Remote

カラー:グラナイト色

¥22,000(税込)

- ① 誤作動防止ロック
- ② プログラムボタン
- ③ ボリュームボタン



ワンタッチで
簡単操作!

スマートリモート

miniPocket

¥19,800(税込)

- ① 誤作動防止ロック
- ② ボリュームボタン
- ③ プログラムボタン

BluetoothでTVの音声を 直接補聴器へ	●	—	—
Bluetoothでスマートフォンの 音声を直接補聴器へ	●	—	—
ボリューム調節	●	●	●
プログラム切替	●	●	●
ミュート	●	●	●
音質変更	—	●	—
FM対応	●	—	—

● スマートフォンアプリ



Signia app (シグニア アプリ)

- 手元のスマートフォンで補聴器を操作
できるから、気づかれない
- 様々な機能が1つのアプリに
- 無料でダウンロード・使用できます



▼インストールはこちら▼



必要なOSやスマートフォンの要件は各ストアのアプリダウンロードページの説明をご確認ください。*端末・OS要件を満たしていても組み合わせによってはアプリが正常に動作しない場合があります。

アクセサリ関連

● 多彩なイヤモールド

		耳かけ型用				
名称		硬質アクリル	軟質アクリル	ポップフィット		
素材		アクリル製	アクリル製	シリコン製		
		硬質	軟質	超軟質		
色		クリア	クリア	17色	適応聴力	特徴
形状	スケルトン				軽 中 高	スタンダードと同じ特徴を持ちますが、外から見える部分を極力削り取りました。地肌が見える部分が多くなるため、スタンダードに比べて目立ちにくくなっています。
	スタンダード				軽 中 高 重	従来から一般に用いられているタイプ。露出部が多いため目立ちやすいのが欠点ですが、皮膚との接触面積が広いのでハウリングが起きにくく、重度難聴にも適しています。



スケルトン



スタンダード

● ポップフィットは、選べる17色



● FMシステム関連製品

オーディオシュー



Contrast HP+用



Contrast SP+用

受信機



※写真は一例です。

リモコンにFM受信機を接続すれば、両耳装用でもFM受信機は1台でOK!

通常の方法

両耳の場合、2台のFM受信機とオーディオシューを使います。補聴器の電池の寿命が短くなります。



リモコンを使う方法

FM受信機1台をリモコンに接続します。オーディオシューは不要です。FM受信機は充電式リモコンの電力を使うので、補聴器の電池寿命に影響はありません。



※FMシステムを使用するには、別途送信機が必要です。

シバントス株式会社

〒242-0007 神奈川県大和市中央林間7-10-1 三機大和ビル 6F

■ 個人のお客様専用窓口

「シグニア補聴器」お客様コールセンター

営業時間 9:00-17:00 (土・日・祝日 定休日)

Tel:0800-888-0303

Tel:046-289-0303 Fax:046-407-1133

■ 販売店様専用問合せ窓口

カスタマーサービス

営業時間 9:00-17:00 (日・祝日 定休日)

Tel:0800-222-4133 Fax:0800-888-4133

Tel:046-409-4133 Fax:046-407-1133

販促物注文専用Fax:050-3730-5795

※本フリーコールはIP電話からはつながりません。
その場合は通常の電話番号までお問い合わせください



個人のお客様向けサイト
www.signia.net/ja-jp



個人のお客様向けメールマガジン
www.signia.net/ja-jp/service/newsletter



www.facebook.com/SigniaHearingJapan/



公式YouTube Signia Hearing



www.instagram.com/signiahearingjapan



twitter.com/SigniaJapan



シグニア補聴器のご相談・ご用命は当店へ

聞こえの詳細な検査は、耳鼻科専門医を受診してください。補聴器は適切なフィッティング調整により、その効果が発揮されます。しかし、装用者の聞こえの状態によっては、その効果が異なる場合があります。このカタログと実際の製品の色・形状は、印刷等の関係で異なる場合があります。

カタログに表示されている価格は希望小売価格です。

医療機器製造販売業許可番号 14B2X00018 このカタログの内容は2021年8月時点のものです。価格や仕様は予告なく変更されることがあります。21.09.JP.17001311

AndroidとGoogle PlayはGoogle LLCの商標です。Apple App StoreはApple Inc.の商標です。Qi(チー)は、Wireless Power Consortiumの登録商標です。Bluetooth®のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有しており、Sivantosによるこれらのマークの使用は、ライセンス許諾されています。その他の商標・商品名に関する権利は、それぞれの所有者に帰属します。



6月6日は補聴器の日